


AQUA-GEL 10cmx12cm 1 sztuka

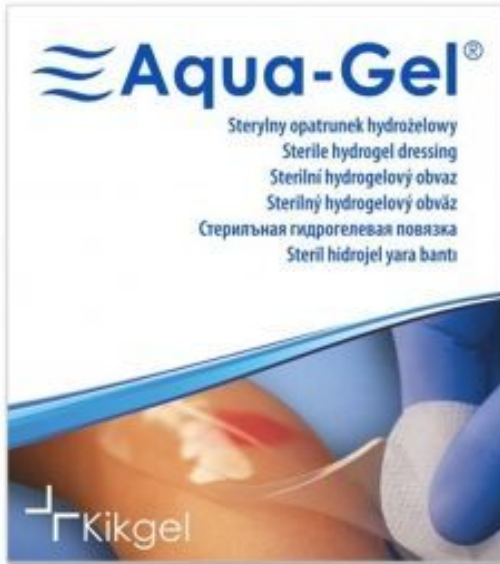

Cena: 10,92 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	KIK GEL - KIK MIROSLAW UJAZD ŚL.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Emplastry hydropolymerosa

Opis produktu

AQUA-GEL 10cmx12cm 1 sztuka

Opatrunek hydrożelowy, o wymiarach 10cm x 12 cm.

Wskazany do stosowania przy oparzeniach I-go, II-go oraz III-go stopnia (termicznych, chemicznych, elektrycznych), oparzeniach słonecznych, owrzodzeniach, odleżynach, innych ranach przewlekłych (np. stopa cukrzycowa), otarciach, stłuczeniach, obrzękach.

Aqua-Gel tworzy wilgotne środowisko wspomagające naturalne procesy autolitycznego oczyszczania się rany i przyspieszające namnażanie nowych komórek wzrostu. Opatrunek dobrze przylega do rany, jednak nie przywiera do niej, dzięki czemu zmiana jest bezbolesna dla pacjenta. Aqua-Gel absorbuje wysięk z rany zatrzymując go wewnątrz swojej struktury wraz z drobnoustrojami. Opatrunek jest elastyczny i łatwy w formowaniu, przez co dobrze przylega również do anatomicznie trudno dostępnych miejsc (twarz, okolice stawów).

Sposób użycia:

Opatrunek umieszcza się dowolną stroną na powierzchni rany. Należy stosować opatrunki o wielkości odpowiadającej rozmiarom rany. Opatrunek należy zabezpieczyć przylepcem włókninowym, folią adhezyjną lub bandażem elastycznym. Opatrunek może być stosowany w kompresjoterapii w przypadku owrzodzeń żylnych. Sposób aplikacji opatrunku: rozerwij torebkę i wyjmij foremkę z opatrunkiem. Trzymając za cienką folię oraz wystający materiał włókninowy wyjmij hydrożel z foremki. Zdejmij cienką folię przykrywającą opatrunek. Umocuj opatrunek za pomocą przylepca włókninowego, folii poliuretanowej lub bandaża.