

AVILIN spray 90ml



Cena: 33,99 PLN

Opis produktu

Opatrunek Avilin Spray 90ml - skład i właściwości

Eter poliwinyllobutylowy, czyli Polimer E- oto tajemnica wynalazku Szostakowskiego. Jest to substancja lepka i gęsta, bezsmakowa, o lekkim zapachu i żółtawym kolorze. Nie przenika do krwi, jest nietoksyczny i nie wywołuje alergii. Doskonale przylega do skóry oraz błon śluzowych i wykazuje wobec nich działanie osłaniające i chroniące przed czynnikami drażniącymi oraz toksynami pochodzenia bakteryjnego. **Przyspiesza gojenie ran i nadżerek** oraz nasila proces **regeneracji nabłonka**. Wspiera procesy ziarninowania ran. Polimer E jest substancją niezwykle odporną. Nie ulega degradacji pod wpływem czynników środowiskowych.

Avilin spray to produkt STERYLNY. Zastosowany na rany **pełni funkcję opatrunku** przylegającego do skóry bez żadnych dodatkowych produktów. **Chroni uszkodzone miejsca przed utratą wody** (odpowiednia wilgotność to jeden z najistotniejszych czynników stanowiących o procesie gojenia ran), **utrzymuje optymalne pH i nie ogranicza „oddychania” skóry.**

Wskazania do zastosowania opatrunku Avilin Spray:

- rany – bardzo szeroko rozumiane
- oparzenia – termiczne, chemiczne, elektryczne
- odleżyny
- rany towarzyszące stopie cukrzycowej
- owrzodzenia goleni
- rany towarzyszące żylakom oraz rany niedokrwienne tworzące się w przebiegu miażdżycy

Jak stosować Avilin Spray na rany?

1xdziennie

opatrunek Avilin należy aplikować na ranę z odległości 10-15 cm tak, aby pokryć preparatem całą uszkodzoną powierzchnię,



zabezpieczyć jałową gazą.

Po zastosowaniu opakowanie należy zamknąć, a przed kolejnym użyciem oczyścić dyszę dozownika przez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zaworka.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na składnik preparatu oraz rany z silnym krwawieniem lub dużą ilością wysięku, rany zakażone, rany z ropną treścią, rany z dużą ilością rozmiękającej martwicy. W każdym z wymienionych przypadków najlepiej skonsultować się ze specjalistą.