

BACTIGRAS opatrunek 10cm x 10xcm 1 szt.

Cena: 3,00 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SMITH & NEPHEW
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

BACTIGRAS opatrunek 10cm x 10xcm 1 plaster

Zastosowanie:

Opatrunek do stosowania na rany, w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia w przypadku ran zagrożonych infekcją, takich jak: niewielkie rany oparzeniowe (max. 10% powierzchni skóry), rany szarpane, otarcia, miejsca pobrania przeszczepu i miejsca dawcze, uszkodzenia popromienne.

Bactigras to opatrunek antyseptyczny z luźno utkanej gazy. Nasączony parafiną z 0,5% chlorheksydyną. Chlorheksydyna zapewnia barierę antyseptyczną o dużym spektrum działania. Opatrunek redukuje ryzyko kolonizacji bakterii, nie przywiera do rany. Opatrunek parafinowy z gazy przepuszcza powietrze i został tak zaprojektowany, aby wysięk z rany mógł swobodnie przedostawać się do znajdującego się na wierzchu kompresu. Pokrycie warstwą parafiny pomaga uśmierzyć ból oraz umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku.

Skład:

Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny.

Sposób użycia:

Pokryć powierzchnię rany pojedynczą warstwą opatrunku.

Zastosować dodatkowy opatrunek absorpcyjny, mocując go przylepcem lub bandażem.

Bactigras może zostać na ranie w trakcie zmiany opatrunku chłonnego. Częstość zmiany opatrunku zależy od stanu klinicznego (od raz na dobę do dwóch razy na tydzień).

Jeżeli opatrunek przywiera do rany można go zwilżyć fizjologicznym roztworem soli kuchennej i delikatnie usunąć z rany.: