

BLIZNASIL silikonowy żel na blizny 15g

Cena: 31,99 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	15 g (tub.)
Postać	-
Producent	NORIS POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

BLIZNASIL silikonowy żel na blizny, wyrób medyczny do leczenia blizn różnego pochodzenia

Bezzapachowy, przezroczysty żel na blizny. Zmniejsza blizny, stają się one mniej widoczne. Uelastycznia je, zmniejsza uczucie napięcia i świądu, przynosi ulgę. Zmniejsza ryzyko powstania blizn przerostowych i bliznowców oraz łagodzi objawy z nimi związane. Jest skuteczny przy stosowaniu na blizny stare oraz nowe, powstałe w wyniku gojenia ran pooperacyjnych, pourazowych i pooparzeniowych.

Wyrób medyczny Bliznasil żel można stosować na każdą bliznę bez względu na sposób i czas jej powstania: bliznowce, blizny przerostowe, po operacjach chirurgicznych, pourazowe, pooparzeniowe, potrądzikowe, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach plastycznych, po terapiach laserowych, rozstępny.

Skład:

Polisiliksany, dwutlenek krzemu.

Sposób użycia:

Leczoną bliznę należy umyć, a następnie wysuszyć. Dwa razy dziennie delikatnie wmasować niewielką ilość żelu. Pozostawić przez kilka minut do wyschnięcia.

Jeżeli została zaaplikowana zbyt duża ilość żelu, to jego nadmiar należy usunąć chusteczką, aby nie poplamić ubrania.

Na prawidłowo nałożoną i wyschniętą warstwę żelu można stosować kosmetyki.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Podczas stosowania preparatu należy unikać niekorzystnych czynników takich jak: urazy i otarcia w okolicy blizny, ekspozycja blizny na promienie UV, niską i wysoką temperaturę.

Uwagi:

Bliznasil jest łagodny i bezpieczny, może być stosowany u dorosłych oraz u dzieci bez względu na wiek.

Przebudowa blizny jest procesem powolnym, a im blizna jest starsza tym wolniej ten proces przebiega. Dlatego najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu żelu Bliznasil przez co najmniej dwa miesiące, nawet wtedy, gdy wydaje się, że problem już zniknął.