

# FIXSIN zestaw do płukania nosa i zatok, butelka 240ml+15 sas.

Cena: 28,99 PLN



## Opis produktu

FIXSIN zestaw do płukania nosa i zatok, butelka 240ml+15 sas.

### Zastosowanie:

Preparat stosuje się w przypadku zapalenia zatok przynosowych, nieżytu nosa różanego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, dla utrzymania higieny nosa i zatok.

Fixsin udrażnia i oczyszcza nos i zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, dzięki czemu ograniczają gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie i rozwój infekcji.

### Skład:

100% chlorek sodu.

### Sposób użycia:

płukanie przeprowadzić 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz. Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania sprawdzić temperaturę wody.