

GRANUFLEX 10x10cm 1 szt.

Cena: 7,25 PLN



Opis produktu

GRANUFLEX 10cmx10cm 1 sztuka

Granuflex opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylny i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), jak i na rany ostre, częściowe oparzenia stopnia I do IIa, czy miejsca donorowe. Może być stosowany we wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozptywną.

Sposób użycia:

Opatrunek Granuflex nakłada się na rany zdezynfekowane roztworem dowolnej substancji, nie opisano interakcji między znanymi środkami dezynfekującymi a aktywnym hydrokoloidem. Opatrunek nakładać na powierzchnie osuszone uprzednio jałową gazą. Musi on zajmować margines skóry nieuszkodzonej (około 2–3 cm).

Opatrunek hydrokoloidowy należy zmienić, gdy zaczynają się spod niego wydobywać nadmierne ilości wysięku, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i higienę pacjenta. W zależności od stopnia wilgotności rany następuje to zwykle między 2 a 6 dniem od momentu założenia opatrunku na ranę. Opatrunki hydrokoloidowe można łatwo przycinać, by dostosować je do kształtu, wielkości i lokalizacji rany. Warstwa wewnętrzna opatrunku jest samoprzylepna, nie wymaga więc on dodatkowego mocowania na ranie.

Skład:

Substancja czynna – aktywny hydrokoloid – cząsteczki karboksymetylocelulozy (20%), żelatyny (20%) i pektyny (20%), zawieszony w masie hydrofobowego poliisobutylenu sodowego (40%).