

PAPIERKI LAKMUSOWE 33 szt.



Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Producent DR.JACOB'S

Rejestracja

Opis produktu

PAPIERKI LAKMUSOWE 33 szt. Dr. Jacobs

Papiereki lakmusowe do badania stanu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu poprzez pomiary pH moczu. Zestaw zawiera 33 sztuki papierek ze skalą pH, umożliwiające 33 pomiary, tabela do nanoszenia wyników, przykładowe interpretacje oraz instrukcja. Wynik badania podaje informację o przybliżonym stanie równowagi mineralnej organizmu, sprawności pracy nerek oraz wątroby.

Papiereki lakmusowe pozwalają w łatwy sposób określić stan równowagi kwasowo-zasadowej organizmu (zakwaszenie, balans, zasadowica), nasycenia organizmu minerałami zasadowymi, a także ogólną sprawność pracy nerek i wątroby. Badania wykonuje się poprzez proste badane pH moczu w warunkach domowych.

Badanie balansu kwasowo-zasadowego

pH moczu zmienia swoje wartości w ciągu doby i jest to zjawisko zupełnie normalne. Dlatego jednorazowy pomiar nie wystarcza. Kilka przypadkowo wykonanych pomiarów także nie pokażą pełnego obrazu i mogą wprowadzić w błąd - można dojść do złego wniosku, że ma się zakwaszenie lub zasadowicę.

Dlatego też pomiarów powinno się robić kilka dziennie przez przynajmniej tydzień. Wartości pomiarów należy zaznaczać w tabeli a następnie narysować wykres, który należy porównać z wykresem wartości prawidłowych.

Sposób użycia:

Zebrać świeży mocz do czystego naczynia.

Oderwać papierek lakmusowy i zanurzyć pole wskaźnika (żółte) na ok. 1 sekundę w moczu.

Można również zwilżyć papierek lakmusowy w strumieniu oddawanego moczu.

Pola wskaźnika nie można wcześniej dotykać palcami.

W zależności od wartości pH pole wskaźnika zmienia swój kolor.

Kolor wskaźnika należy porównać ze skalą kolorów w ciągu 2 minut i odczytać wartość pH.