

PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3 1 sztuka

Cena: 25,00 PLN



Opis produktu

PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3 1 sztuka

Półmaska filtrująca ZF 0/35z FFP3 NR służy do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia 20-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia.

NR - oznacza maskę jednorazowego użycia (do max. 8 godzin stosowania).

Półmaska pakowana jest w przezroczystą torebkę foliową.

Norma Europejska: EN 149:2001 + A1:2009.

Sposób użycia:

Półmaskę należy zakładać na twarz w czystej atmosferze. Należy zakładać półmaskę na twarz w taki sposób, żeby zacisk nosowy znalazł się na nosie a tasiemki na głowie. Dla uzyskania szczelności półmaski trzeba dobrze docisnąć zacisk na nosie i wyregulować taśmy wokół głowy. Półmaska jest dobrze założona na twarz wtedy, gdy po gwałtownym wydechu (trzeba wtedy położyć dłonie na półmasce) da się wyczuć nadciśnienie w półmasce.