

TEST ANTYGENOWY ZE ŚLINY COVID-19 kasetkowy 1 szt.



Cena: 25,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

TEST ANTYGENOWY ZE ŚLINY COVID-19 kasetkowy 1 szt.

COVID-19 ANTYGEN szybki test (ślina) domowy, kasetkowy test przeznaczony do jakościowego wykrywania antygeny wirusa SARS-CoV-2 w próbce ludzkiej śliny. Test potwierdzający zakażenie COVID-19

COVID-19 Antygen szybki test (ślina) jest zestawem jednorazowego użytku przeznaczonym do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w próbce ludzkiej śliny. W czasie testu próbka z materiałem badanym (ślina), poddana jest reakcji ze swoistymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko SARS-CoV-2. Membrana nitrocelulozowa kasety testowej zawiera linię testową i linię kontrolną. Test jest przeznaczony do samokontroli.

Test antygenowy ze śliny Covid-19 Antigen przeznaczony jest do użytku domowego z zastosowaniem samodzielnie pobranych próbek śliny od osób z objawami podejrzewanych o zakażenie lub zakażonych Covid-19.

Wynik testu pozwala na uzyskanie wstępnego wyniku, który powinien zostać potwierdzony dalszymi badaniami.

Wskazania do wykonania testu:

- gorączka,
- zmęczenie,
- suchy kaszel.

Sposób użycia:

1. Głęboko zakasłać 3-5 razy.
2. Założyć lejek; wypełnić śliną do zaznaczonej linii.
3. Zdjąć lejek, próbkę ze śliną włożyć do otworu i włączyć cały bufor.
4. Nałożyć końcówkę do pipetowania i nacisnąć 10-15 razy dół próbki.
5. Zaaplikować próbkę na kasetę testową - 2 krople.



6. Odczekać 15 minut, sprawdzić wynik.

Szczegółowa instrukcja obsługi wraz ze schematem interpretacji wyniku znajduje się w opakowaniu produktu.

Zawartość opakowania:

kasta testowa,
zestaw do pobrania próbek (lejek, probówka i końcówka zakraplająca),
bufor,
torebka na odpady,
instrukcja użycia.